



NOM DE CODE: "EX-Z"

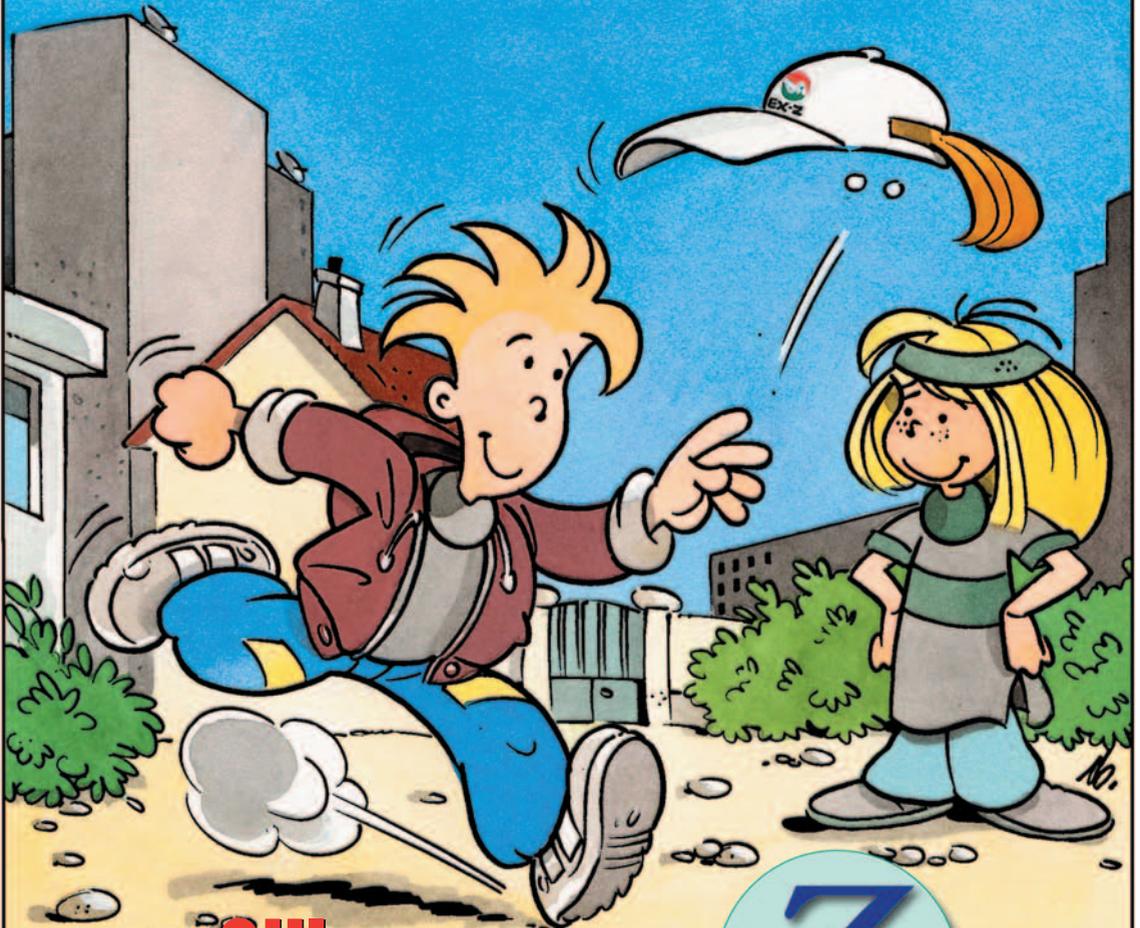

**JE DIS OUI AUX LENTILLES...
AVEC LE PACK**








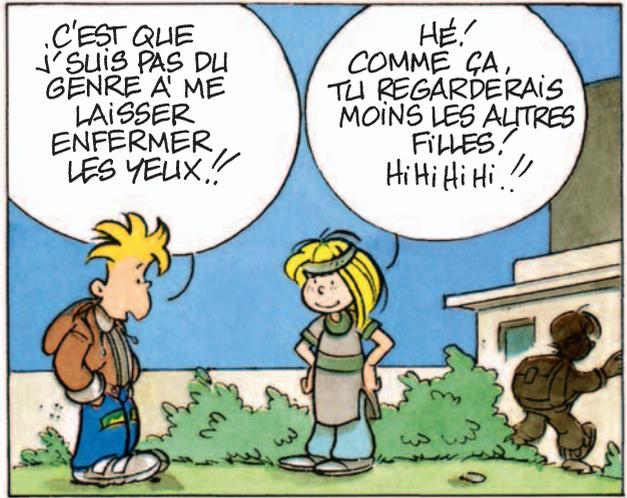



* REGARDE-MOI!



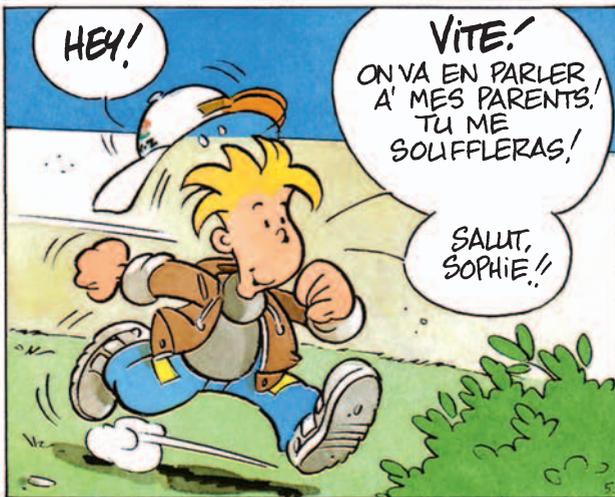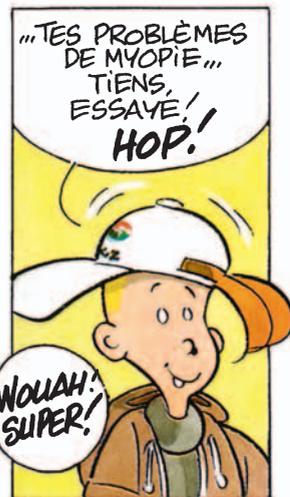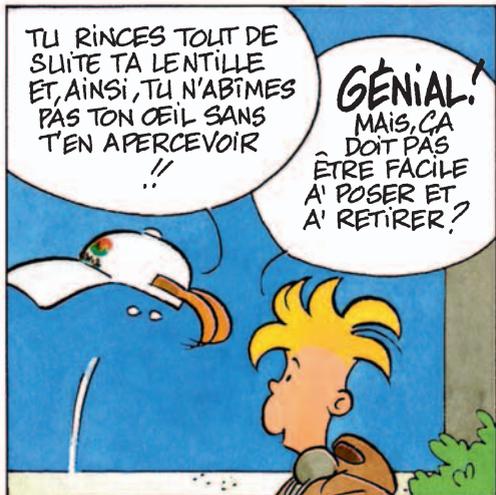



HÉ! RALENTIS!
JE NE TIENS PAS
SUR TA TÊTE,
MOI!!



A' PROPOS DE COURSE...
TU POURRAS FAIRE DU
SPORT AVEC TES
LENTILLES PERMÉABLES!
SAUF, BIEN SÛR, LE
RUGBY, LE JUDO...



... LES SPORTS SUR TERRAINS
POUSSIÉREUX... ET SURTOUT
TU DEVRAS LES ENLEVER
POUR TE BAIÑNER
!

AH,
BON?

6



C'EST PAS TROP
TERRIBLE COMME
RESTRICTIONS,
NON? **HUM!**

ÇA SENT
BON CHEZ
TOI!




BONJOUR, MAN! TU
PARLES TOUT SEUL,
MAINTENANT?!

HEU... NON!
... A'... LINE
CASQUETTE!
HEU...
JE...



... J' VEUX DIRE...
ÇA SENT BON!
QU'EST-CE QU'ON
MANGE?
...

**DES
LENTILLES!**

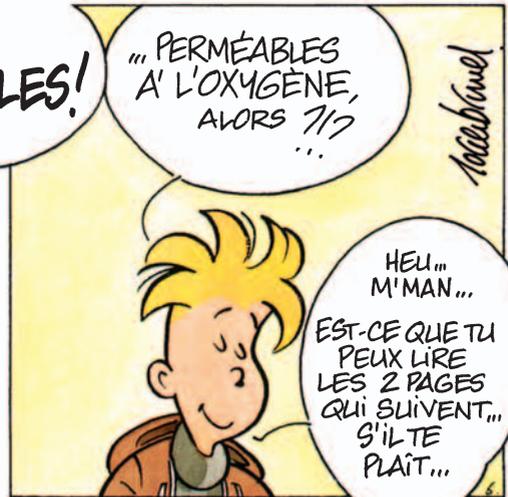

... PERMÉABLES
A' L'OXYGÈNE,
ALORS ??
...

HEU...
M'MAN...
EST-CE QUE TU
PEUX LIRE
LES 2 PAGES
QUI SUIVENT...
S'IL TE
PLAÎT...

Accabonné



LES LENTILLES ULTRA-PERMEABLES Z DE MENICON POUR LES JUNIORS !

POURQUOI LE CHOIX DES LENTILLES PAR RAPPORT AUX LUNETTES ?

Avant l'âge scolaire, les lentilles seront proposées essentiellement pour des indications médicales. Ensuite, interviennent aussi les raisons esthétiques et/ou pratiques.

RAISONS ESTHÉTIQUES ET/OU PRATIQUES

- L'enfant est demandeur, de plus en plus tôt, souvent à partir de huit ans, qu'il soit myope, hypermétrope et/ou astigmaté.
- Les lentilles aident son épanouissement scolaire et le développement de sa personnalité.
- Le champ de vision est agrandi et non limité par la monture.
- Les adolescents, au lycée, bénéficient, souvent en continu, de cette vision sans contrainte pratique ou esthétique.

INDICATIONS MÉDICALES

- Dès le plus jeune âge, les lentilles sont réservées aux cas de cataractes congénitales ou de plaies traumatiques indiquées par l'ophtalmologiste.
- Entre 3 et 6 ans, elles seront préférées aux lunettes pour aider le développement visuel de l'enfant. Ainsi :
 - Le strabisme d'un enfant hypermétrope peut être amélioré ;
 - En présence d'une différence importante de vision entre les deux yeux l'enfant bénéficiera d'un meilleur confort visuel ;
 - Les lentilles perméables seront aussi recommandées pour un fort défaut visuel ou pour une myopie évolutive.




COMMENT PRÉSERVER SA SANTÉ OCULAIRE ?

- Penser à l'avenir visuel à long terme de l'enfant.
- Les lentilles ultra-perméables Z de Menicon laissent mieux respirer l'œil de votre enfant même si elles sont portées jour et nuit (jusqu'à 30 jours d'affilée). Plus petites, elles sont fabriquées dans un matériau ultra-perméable et les larmes circulent facilement sous la lentille.
- Les risques d'allergie ou d'infection sont minimisés (tout éventuel incident sera

ressenti comme un signal d'alarme avec le réflexe d'enlever immédiatement les lentilles).

- La vision est inégalée pour les myopes, les hypermétropes et/ou les astigmatés.
- Les résultats observés pour stopper l'évolution de la myopie chez les enfants porteurs de lentilles rigides ultra-perméables à l'oxygène s'expliquent en particulier par la qualité de l'image rétinienne.

De 0 à 16 ans, les lentilles rigides ULTRA-PERMÉABLES Z de MENICON sont recommandées en première intention pour garantir la meilleure qualité de vision possible en préservant la santé oculaire.

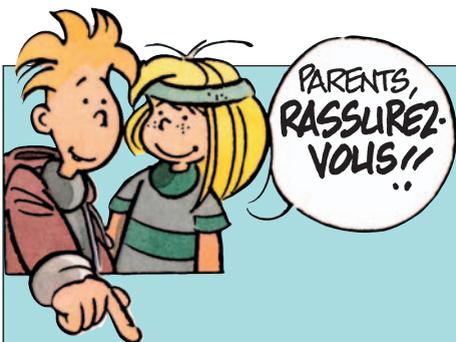

LES LENTILLES ULTRA-PERMEABLES Z DE MENICON POUR LES JUNIORS !

● UN ACCORD TRIANGULAIRE ENTRE L'OPHTALMOLOGISTE, L'ENFANT ET VOUS

Le type de géométrie de lentilles et le calendrier de port seront définis par l'ophtalmologiste lors des essais. Votre enfant, dès l'instant où il est d'accord pour porter des lentilles, s'habitue très vite : les modalités pratiques de port seront clairement définies et à respecter au quotidien avec des gestes simples de manipulation et d'entretien.

Votre implication est importante dans le respect des visites de suivi et la date de renouvellement annuel des lentilles.

● PRATIQUE SPORTIVE

Presque tous les sports peuvent être pratiqués avec des lentilles. Quel progrès de pouvoir courir, sauter, danser avec une vision parfaite ! Sont cependant déconseillés le rugby, le judo, l'équitation en manège (à cause de la poussière)... et la baignade en piscine est à proscrire avec les lentilles.

LE PREMIER CONCEPT SÉCURITAIRE POUR LES JEUNES

Composition du Pack Z Junior

- Une paire de lentilles en matériau Z.
- Un flacon de solution Menicare Plus 250 ml + étui.
- Un flacon de poche 50 ml pour le cartable.
- Une boîte Menicon Progent 5 traitements + étui.
- Un Meni-book éducatif pour les Juniors...
- Un CD-Rom Menigame...

Tout pour

la sécurité

● LE PORT EN CONTINU SÉCURISÉ

À l'occasion d'un week-end, de vacances ou à la suite de longues soirées à l'adolescence... C'est une option avec les lentilles Z ULTRA-PERMEABLES à discuter avec l'ophtalmologiste.

● LES ENFANTS S'OCCUPENT TRÈS BIEN DE LEURS LENTILLES

Ils les manipulent avec une facilité déconcertante !

L'entretien quotidien est simplifié avec la solution multifonctions MeniCare Plus (en association avec Progent une fois par semaine) et c'est une bonne façon de les responsabiliser. Apprendre à regarder l'état de ses yeux et de ses lentilles est vite un réflexe.

Visitez www.menigame.fr le site éducatif lentilles créé pour eux.

● ORDINATEUR, TÉLÉVISION ET JEUX VIDÉOS...

Les lentilles en matériau Z ne se déshydratent pas, elles ne risquent pas de se déformer et resteront bien tolérées.



OUI AUX LENTILLES POUR VOTRE ENFANT !

Parlez-en avec votre ophtalmologiste. Et pour plus d'informations www.menicon.fr

